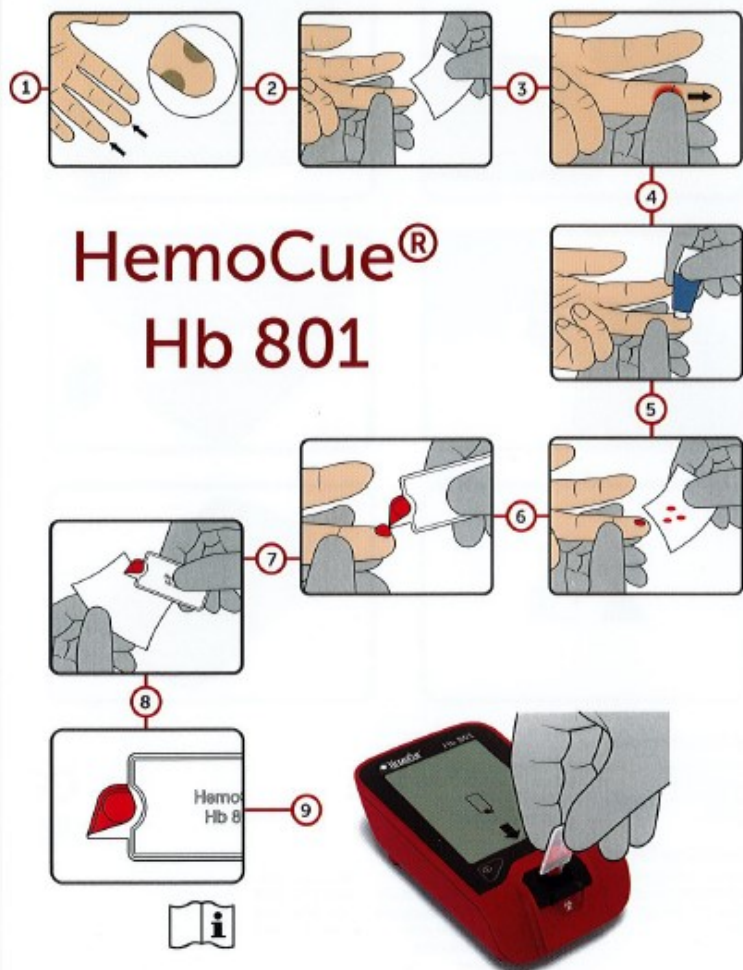


Indication :

Mesure du taux d'hémoglobine à partir d'une goutte de sang veineux ou capillaire.

Mode d'emploi :


- Désinfecter puis piquer la face latérale du doigt,
- essuyer les 2 premières gouttes de sang,
- exercer une légère pression pour faire apparaître une nouvelle goutte de sang,
- quand la goutte est assez grosse : remplir la micro cuvette en 1 seule fois sans faire de bulles, essuyer avec une compresse tout excès de sang.

- Allumer l'appareil
- attendre l'apparition des trois tirets à l'écran,
- insérer la micro cuvette,
- lire le résultat en g/dl,
- le résultat s'affiche en 15 s à 1 minute.

La microcuvette doit être placée dans l'appareil dans les 10 secondes qui suivent le prélèvement

Nettoyage de l'appareil :

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une lingette imprégnée de solution désinfectante.



En cas d'apparition du pictogramme ci-contre sur l'écran : le récepteur de la micro cuvette doit être nettoyé.



Mettre l'appareil en retour PUI.



Maintenance préventive annuelle : test de performance à la PUI.